

STOCKING WEARING HELPER


**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ НАДЕВАНИЯ
КОМПРЕССИОННОГО ТРИКОТАЖА – HELPER**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ваша победа над варикозом

www.nikamed.ru

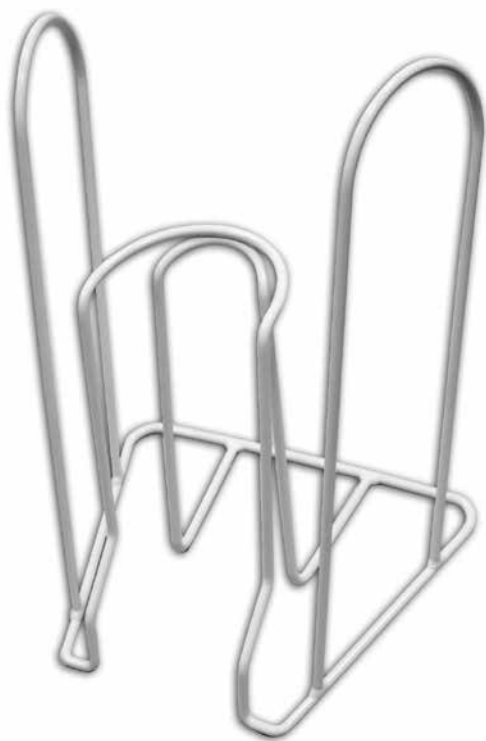

Характеристика:

Специальное приспособление для надевания противоварикозного трикотажа – HELPER.

Назначение:

HELPER – это простое в применении приспособление, которое значительно упрощает процесс надевания компрессионных противоварикозных изделий, экономит силы и время, а также является оптимальным решением для пациентов с ограниченными двигательными возможностями.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

1. Расположите приспособление HELPER дугообразной частью к себе.

2. Поместите компрессионное изделие носком вперед, пяткой к себе, выверните изделие наизнанку и натяните его на рамку до появления пяточной части, как показано на рисунке.



3. Поставьте приспособление HELPER на пол пяткой к себе. Вставьте носок ноги в носок чулка.





4. Опустите стопу до пола.



5. Потяните за ручки устройства вертикально вверх, чтобы натянуть чулок до середины голени.



6. Отклоните основание приспособления для надевания противоварикозного трикотажа – HELPER назад. Уберите устройство.



7. Теперь обеими руками берите чулок изнутри и тяните его к колену. Аккуратно натягивайте компрессионное изделие выше колена, устраняя складки, образовавшиеся в области сгиба под коленом. При надевании чулок не тяните за ажурную резинку во избежание отрыва резинки от чулка.

8. Равномерно расправьте изделие вверх по ноге.

9. Окончательно разгладьте чулок.

УХОД:

1. Не допускайте царапин и заусенцев на поверхности приспособления, так как нарушение гладкой поверхности может привести к повреждению надеваемых компрессионных противоварикозных изделий.

2. В случае загрязнения приспособления, протрите его слегка влажной мягкой тканью, смоченной в теплой воде с детским мылом.

3. Не допускайте нагревания приспособления, это может привести к его деформации и повреждению поверхностного слоя.

4. Не допускайте механического или иного воздействия на приспособление, которое может привести к деформации приспособления или нарушению его целостности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

12 месяцев с момента продажи, при соблюдении инструкции и правил по эксплуатации приспособления.

СРОК СЛУЖБЫ:

Срок службы не менее 3-х лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Поставляется в комплекте: приспособление для облегчения надевания компрессионного трикотажа HELPER, пакет для переноски и хранения приспособления, инструкция по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

ХРАНЕНИЕ:

Приспособление следует хранить и использовать в соответствии с гигиеническими требованиями и инструкциями по работе с металлическими изделиями. Так как условия и способы использования приспособления не могут быть проконтролированы компанией производителем, ответственность за безопасность и сохранность несет пользователь.

Храните изделие в упаковке, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Не ставьте на приспособление предметы, которые могут его повредить.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:

Продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии (письмо ОАО «ВНИИС» №101-ксл\035 от 18.01.2010).

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

**С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕН**

Дата покупки _____ Подпись покупателя _____

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,
Потсдамер штрассе, 92, Д-10785, Берлин, Германия.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп»,
Россия, 127220, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.